

SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

Epitome® bladskalpell för precisionskirurgi

Epitome är en steril bladskalpell avsedd för precisionskirurgi inom Plastikkirurgi med flera kirurgiska specialiteter. Den skärande eggen består av en tunn volframtråd som ligger inbakad i det keramiska skalpellbladet. Energin koncentreras i eggen medan bladsidorna inte värms upp. Epitome ger ett exakt snitt med ett minimum av hemostas och rökgasutveckling. Bladet bränner inte fast i vävnaden och är lätt att hålla rent vid långa operationstider. Epitome kan användas för dissektion i fettvävnad. Böjbara blad och olika längder på blad och skaft ger optimal åtkomst i trånga operationsfält.

Art nr	Egg	Blad längd	Flex skaft	ZapGuard	Skaft längd	Fattning diameter	Antal/ förp
CBE-200	0,2	18	Nej	Nej	50	2,4	25
CBE-210	0,2	4	Ja	Nej	50	2,4	25
CBE-220	0,2	4	Ja	Ja	50	2,4	10
CBE-250	0,2	18	Nej	Nej	100	2,4	25
CBE-260	0,2	4	Ja	Ja	100	2,4	10
CBE-270	0,2	4	Ja	Ja	150	2,4	10
CB4-200	0,2	18	Nej	Nej	50	4,0	25
CBE-100	0,4	18	Nej	Nej	50	2,4	25
CBE-150	0,4	18	Nej	Nej	100	2,4	25
CB4-100	0,4	18	Nej	Nej	50	4,0	25

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

Material

Egg - Volfram 0,2 mm resp. 0.4 mm

Blad – Keramisk komposit (yttrium/zirkonium)

Skaft – Rostfritt stål

Isolering – Polypropylen resp. polyolefin (CBE-210, -220, -260, -270)

Zap Guard – Silikon

Bruksanvisning

Rekommenderad uteffekt vid användning med Utah Medical Products Inc.s elektrokirurgiska generator Finesse (ESU-220 el FIN-220) är 10-20 watt som försiktigt kan ökas beroende på vävnadsfuktighet och typ av vävnad samt arten av ingrepp. Rekommenderad inställning är Cut eller Blend, men Epitome kan användas med Coag i fettvävnad. Epitome kan användas för spray- eller kontaktkoagulation.

- **BLADET FÅR EJ VRIDAS I SIDLED.**
- Undvik direkt kontakt mellan eggen och metall, brosk eller benvävnad
- Använd isolerade kirurgiska instrument.
- Rengör endast med fuktad gasväv.
- Max uteffekt 100 watt.
- **Får ej omsteriliseras eller återanvändas.**

2212

CORTEC MEDICAL AB

Mercuriiparken 2, 211 20 Malmö, tel: 040 664 59 50, fax: 040 788 63, kundservice@cortec.com ,
www.cortec.com

Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.