

# ANVÄNDARINSTRUKTION

## Umbili-cath® steril navelkateter för neonatalpatienter (polyuretan Tecoflex)

Polyuretankateter för administration via naveln för neonatalpatienter. Katetern har en rundad ändpunkt med två utloppshål vilket underlättar vätskeflödet. Katetern är graderad i 1 cm intervall 0-34 cm och är röntgentät. Katetern är tillverkad i polyuretan och kan användas kontinuerligt i 30 dagar.

Umbili-cath kateter med enkel lumen har en anslutning med en infusionsport.

Umbili-cath kateter med dubbel lumen har en anslutning med två infusionsportar och kran.

Med luer lock-anslutning. Katetern är röntgentät.

Art nr	Beskrivning	French	Material 1)	Längd 2)	Antal/ förp.	Kateter YD	Kateter ID	Katetervolym
4183505	Navelkateter enkel lumen PU	3,5	Polyuretan	34 cm	10 st	1,16 mm	0,51 mm	0,15 ml
4185005	Navelkateter enkel lumen PU	5,0	Polyuretan	34 cm	10 st	1,67 mm	0,84 mm	0,25 ml
4283505	Navelkateter dubbel lumen PU	3,5	Polyuretan	34 cm	10 st	1,16 mm	0,60 mm	0,15 ml
4285005	Navelkateter dubbel lumen PU	5,0	Polyuretan	34 cm	10 st	1,67 mm	0,69 mm	0,25 ml

YD = ytterdiameter, ID = innerdiameter

1) Anslutningen mellan kateter och kran är tillverkad i polyuretan. Kranen är tillverkad i polykarbonat.

2) Kateterns längd räknas från ändpunkten till anslutningen.

## FÖLJ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ADMINISTRATION AV NAVELKATETER

### OBSERVERA

- Katetrarna är mjuka och känsliga för skada.
- Var försiktig så att inte katetern skadas av operationsinstrument eller högt injektionsstryck.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats.
- Katetern får ej omsteriliseras eller återanvändas.

**CORTEC MEDICAL AB**

Mercuriiparken 2

211 20 Malmö, tel: 040 664 59 50

kundservice@cortec.com, [www.cortec.com](http://www.cortec.com)

Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.