

SNABBINFO OM STERILISERING

Vi hänvisar till CE-certifierad steriliseringsinstruktion som finns i varje förpackning.

Sterilisering av isolerade instrument och spekula för elektrokirurgi

Rengöring

- Kontrollera att den blåa ytbeläggningen av nylon är intakt
- Skölj av och låt ligga i varmt vatten med diskmedel
- Använd endast diskmedel med neutralt pH
- Använd extra mjuk borste samt liten flaskborste för rökaskanalen
- Använd enzym diskmedel för att avlägsna proteinrester
- Maskindisk vid neutralt pH och max 90 °C
- Torka före autoklavering

Autoklavering

- Spekula packas var för sig och i "öppen position"
- Undvik kontakt mellan nylonbeläggningen och ren metall
- Autoklavera vid 134 °C i 3 min eller 121 °C i 15 min
- Max temp 134 °C och max tryck 32 psi (2,2 atm)

Använd ej

- Diskmedel som är frätande, blekande eller slipande
- Surt eller alkaliskt diskmedel (skall vara ca pH 7)
- Kemisk kall sterilisering
- Ultraljud eller värmesterilisering med glaspärlor

OBS

- Ytbeläggningen måste vara intakt för att skydda mot elektrisk stöt
- Använd inte spekula / instrument med skadad ytbeläggning
- Undvik kontakt med Lugols lösning (ger missfärgning)
- Garantin gäller under förutsättning att ovanstående anvisningar följs

CORTEC MEDICAL AB, Kanalgatan 3, 211 40 Malmö, tel 040 664 59 50, fax 040 788 63
www.cortec.com

Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.