

Snabbinfo om användning

BT-Cath® steril intrauterin ballongtamponad kateter för postpartumblödning (PPH)

BT-Cath® är en mjuk ballongtamponad/kateter i silikon som skapar direkt tryck mot uterus för att kontrollera postpartumblödning (PPH). BT-Cath® har en dränagelumen som möjliggör intrauterint dränage och ger snabb övervakning av tamponadens effektivitet. Avrinningsporten är i nivå med den uppblåsta ballongens topp (ingen slang sticker ut från ballongen), vilket möjliggör placering nära fundus. **Checkventiler och andra kitkomponenter ingår för att förenkla och påskynda inflationsprocessen.**

Designfördelarna med BT-Cath:

- En mjuk ballong som är lätt att föra in, anpassar sig till uterus, ger dränering nära fundus och kräver inte ett kirurgiskt ingrepp för borttagning.
- En uterin avrinningsport som är i nivå med toppen av den uppblåsta ballongen.
- Kan användas vid kejsarsnitt samt vaginal förlossning.
- En dubbellumenkateter som möjliggör infusion av saltlösning för att expandera ballongen samtidigt som uterin avrinning möjliggörs för övervakning av hemostasens framsteg.
- Hållbara silikonkomponenter med optimal biokompatibilitet och styrka.
- Två sprutor för oavbruten infusion av saltlösning för snabb tamponadexpansion.
- En påsplugg (bag spike) och stopcock utrustad med checkventiler för effektiv infusion av saltlösning utan behov av upprepade manipulationer av en stopcock.

| Art nr | Beskrivning | Material | Längd | Antal/ förp. | Sprutvolym | Ballong- volym |
|---------------|---|----------|-------|-----------------|------------|-------------------|
| BTC-ESY 1) | BT-Cath® EasyFill™ ballongtamponad/ kateter för postpartumblödning | Silikon | 52 cm | 2st | 60 ml | 500 ml |
| BTC-100 1) | BT-Cath® ballongtamponad/kateter för postpartumblödning | Silikon | 52 cm | 2st | 60 ml | 500 ml |

1) Katetern är tillverkad i silikon. Kranen är tillverkad i polykarbonat.

BT-CATH® MED EASYFILL™ INFLATIONSSYSTEM

BT-Cath®-ballongtamponadkateter med EasyFill™-systemet förenklar processen för ballongfyllnad vid akut postpartumblödning. Den innovativa EasyFill™-designen möjliggör inflation med endast en person och inkluderar en enda spruta och ett slangset (saltlösning ingår inte i kitet).

Vätskan dras direkt från saltlösningsspåsen genom slangen och in i sprutan. När sprutan trycks ut, tillåter en speciell ventil endast vätska att flöda in i BT-Cath®. Det är inte längre nödvändigt att växla mellan två fyllda sprutor. EasyFill™ skapar ett slutet och säkert system.

FÖLJ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ADMINISTRATION AV BALLONGTAMPONAD.

OBSERVERA

- Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.
- Var försiktig så att inte katetern skadas av operationsinstrument eller högt injektionstryck.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats.
- Katetern får ej omsteriliseras eller återanvändas

CORTEC MEDICAL AB
Mercuriiparken 2, 211 20 Malmö, tel: 040 664 59 50
kundservice@cortec.com , www.cortec.com
Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.